Orthopedics Division DYNESYS TM


Хирургическая техника

Dynamic

Neutralization

System for the

Spine

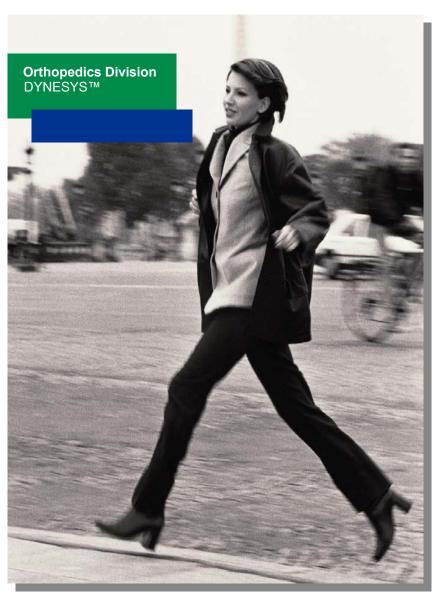



Введение

- DYNESYS является динамической системой нейтрализации для поясничного отдела спины (L1-S1)
- Цель DYNESYS репозиция и рестабилизация до 5-ти динамически нестабильных сегментов
- Обеспечивает контролируемый диапазон движения, подавляя дисковертебральную дискинезию (которые мы называем паразитными движениями)



Введение

- DYNESYS состоит из педикулярных винтов, шнуров и универсальных спейсеров
- Универсальные спейсеры и шнуры соответствуют стандарту ISO 10993
- Педикулярные винты соответствуют ISO 5832-11



Показания

- Гипомобильная дископатия:
 Ретролистез
 Периодическое образование межпозвоночной грыжи
- Гипермобильная дископатия:
 Дегенеративный антеролистез
- Динамический стеноз



Общая информация

- Сохраняйте асептичность раны, пользуясь по возможности ТОЛЬКО инструментами
- Любая инфекция должна быть вылечена посредством антибиотиков




Пред- и послеоперационный период

- Профилактика тромбоэмболии
- Профилактика антибиотиками инфекционных осложнений



Расположение пациента

Позиция колени-грудь

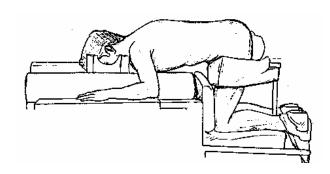

- Не создавайте давления на брюшную полость
- Свободный доступ для электроннооптического преобразователя



Операционный доступ

- Срединный поясничный разрез поверх остистых отростков позвонков
- На один сегмент длиннее (проксимально и дистально), чем запланированный уровень вмешательства
- Мышечные ткани сдвигаются в стороны от остистых отростков Применяется также доступ Вилца (Wiltse)





- Латеральнее дугоотростчатого сустава
- Используйте шаблон спейсера для определения положения

Важно:

Сочленение должно остаться нетронутым





 С помощью шаблона спейсера определяется положение головки педикулярного винта и универсального спейсера





Не нарушайте соосность расположения винтов






 Нанесите шилом направляющие отверстия

Внимание:

Не нарушайте угол и местоположение винтов, вымеренные шаблоном спейсера



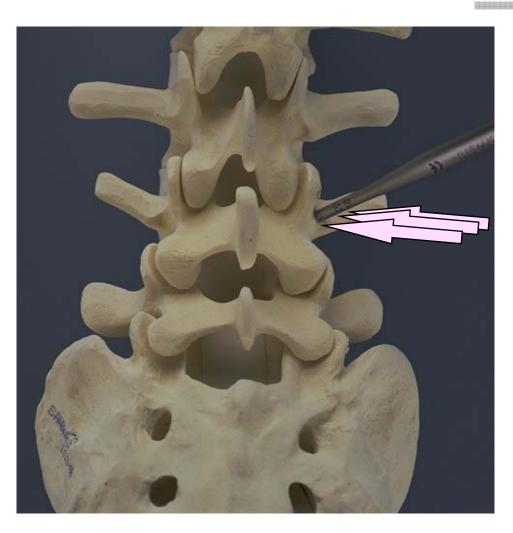

- Диссектором определяется местоположение винтов (при необходимости под рентген-контролем)
- Отметки на диссекторе помогают определить длину винтов (35мм, 45мм и 50мм)

Внимание:

Избегайте прокалывания позвонка насквозь





 Проверьте с помощью тестового крючка целостность ножек дуги позвонка.







- Педикулярный винт поместите в инструмент для установки винтов
- Закрутите педикулярный винт

Важно:

По возможности, используйте самые большие и длинные винты



Максимальное расстояние между костью и центром головки винта: 10мм


Расположение педикулярных винтов

 Вкручивайте винт, пока его головка не соприкоснется с КОСТЬЮ (отметка на направляющей винта показывает положение его головки)

Внимание:

Не вывинчивайте педикулярный винт, т.к. из-за его конической формы существует опасность ослабления фиксации!



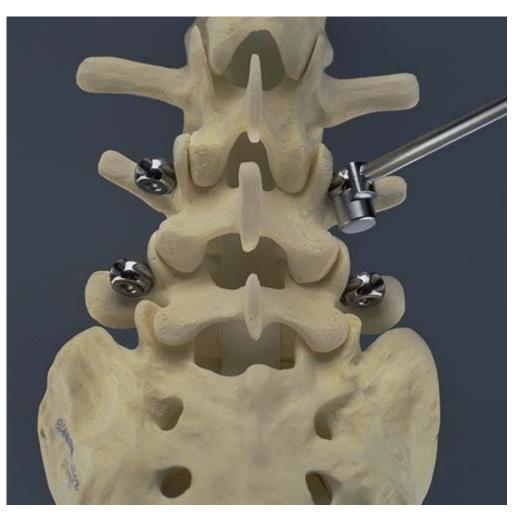


- Закрепите все винты
- При помощи шаблона спейсера проверьте расположение винтов и универсальных спейсеров

Важно:

Шаблон спейсера должен соприкасаться с педикулярным винтом



Универсальный спейсер

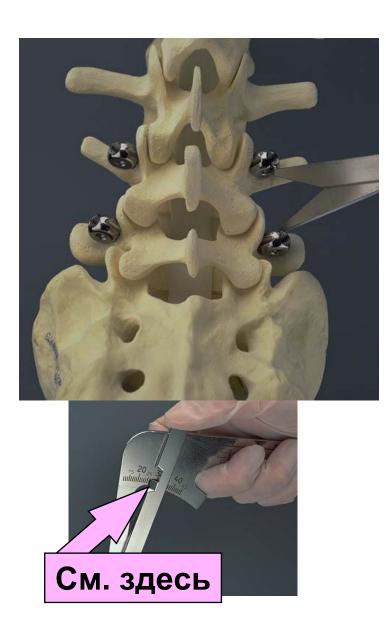


- Поместите измеритель дужки позвонка между винтами
- Измерьте расстояние в соответствии с показаниями (концевые платины должны быть максимально параллельны)
- В тоже время, под рентгенконтролем проверьте положение винтов

Важно:

Не доводите изгиб позвоночника до кифоза



Универсальный спейсер

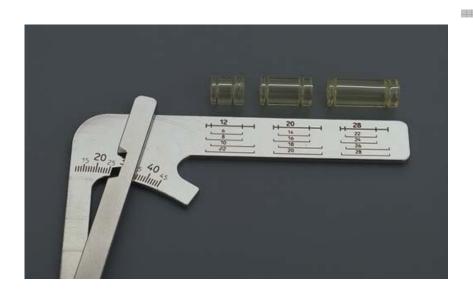


 Обрежьте универсальный спейсер под необходимый размер
 Для этого используйте обрезчик спейсера (Кат №01.03799.020)

Важно:

Используйте только один универсальный спейсер на сегмент



Шнур

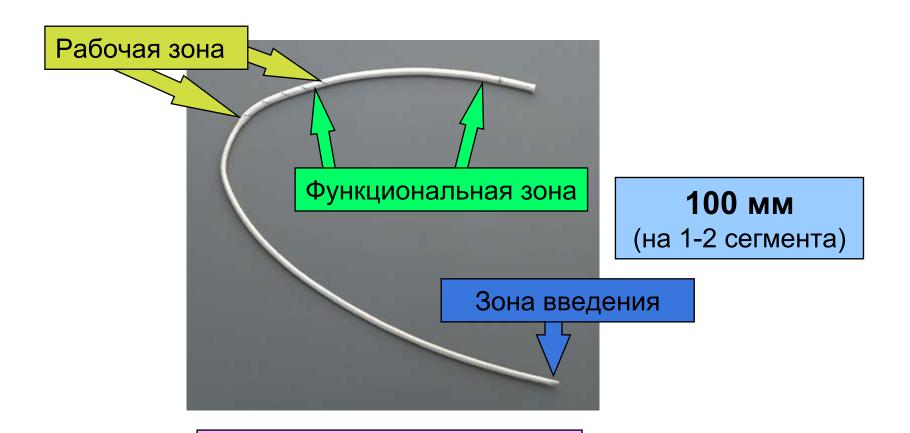

Важно:

Не работайте в функциональной зоне





 Вводите шнур через педикулярные винты до середины его рабочей зоны (зеленые отметки)





Проведите шнур через универсальный спейсер


(спейсер соприкасается с педикулярным винтом)






Проведите шнур через второй педикулярный винт



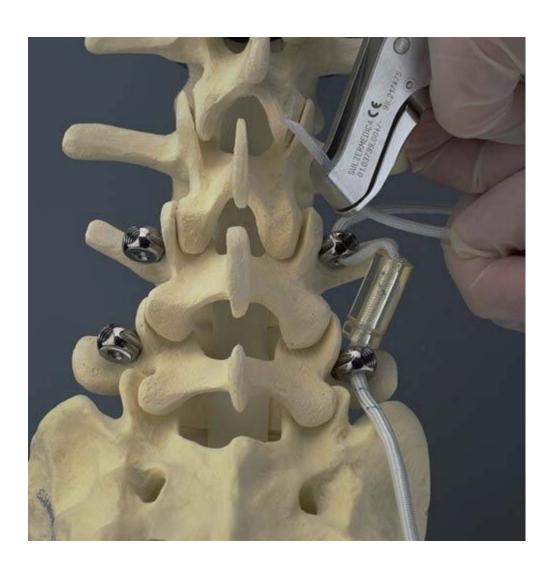

- Шнур, педикулярный винт и спейсер должны быть расположены по одной линии (не допускайте перекручивания шнура)
- Введите шнур в натяжитель шнура



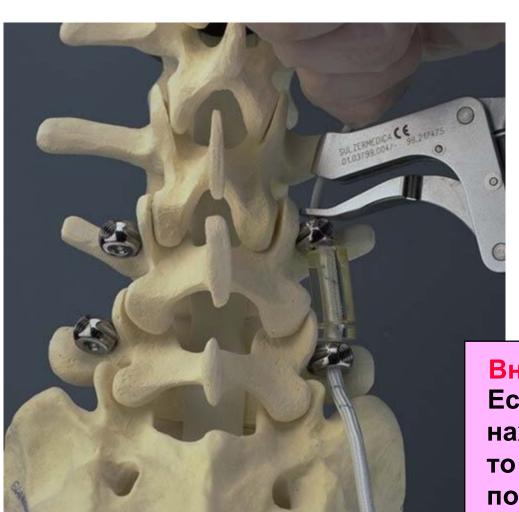

 При помощи натяжителя шнура поставьте спейсер на место (потяните за конец шнура одной рукой)

Внимание:

Если шнур, винт и спейсер находятся не на одной линии, то при натягивании шнур может повредиться в переходной зоне






 Альтернативный способ постановки спейсера: при помощи дистрактора раздвиньте остистые отростки и установите спейсер между винтами



Сборка (альтернативный метод)



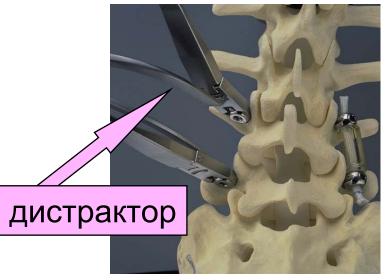

- Поместите расширительный переходник на педикулярные винты
- Поместите дистрактор на основание переходника

Внимание:

Используйте расширительный адаптер только с дистрактором




Сборка (альтернативный метод)



- Раздвиньте систему таким образом, пока универсальный спейсер не поместится между винтами
- Проденьте шнур в педикулярные винты и спейсер



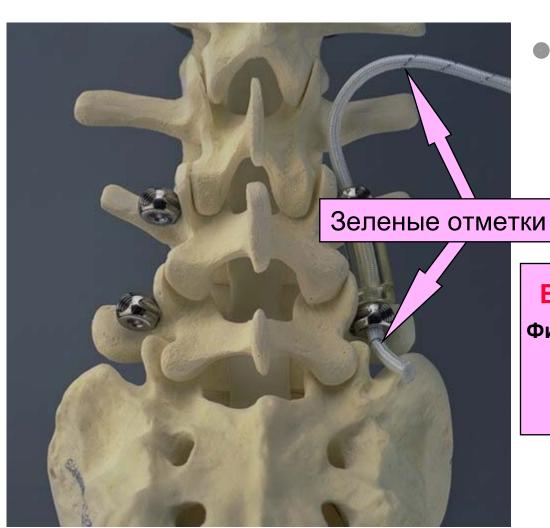

С помощью натяжителя шнура установите спейсер на место

Важно:

Фиксируйте шнур в функциональной зоне (между зелеными метками)








- Установите фиксирующий винт во втулку шестигранной отвертки
- Закрепите конец шнура первым фиксирующим винтом



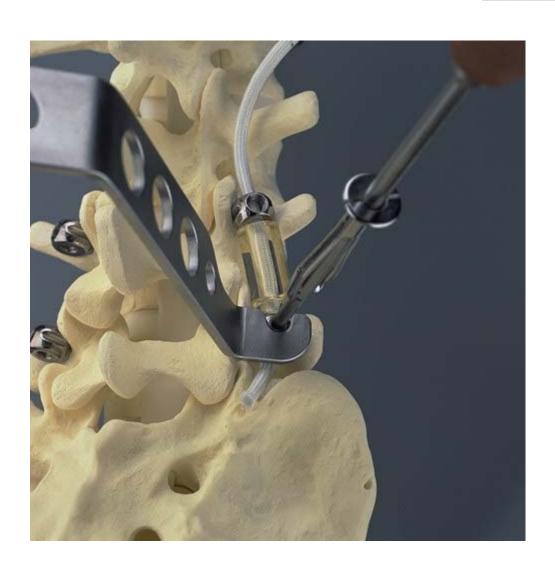

- Используйте инструмент блокировки винтов для того, чтобы избежать смещения педикулярного винта
- Закрепите с силой, равной 4 Нм
- Повторите процедуру фиксации на противоположной стороне









 Отметки индикатора преднагрузки видны на обеих сторонах инструмента

Индикатор преднагрузки




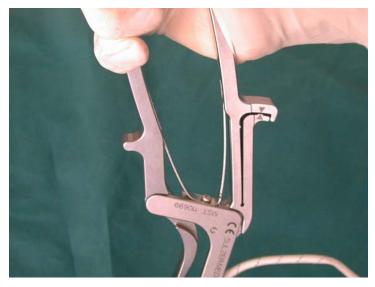

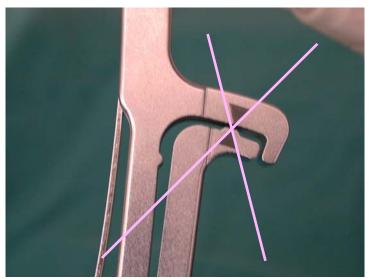


 Преднагрузка системы равна 300 Н, когда обе отметки на натяжителе шнура совпадают



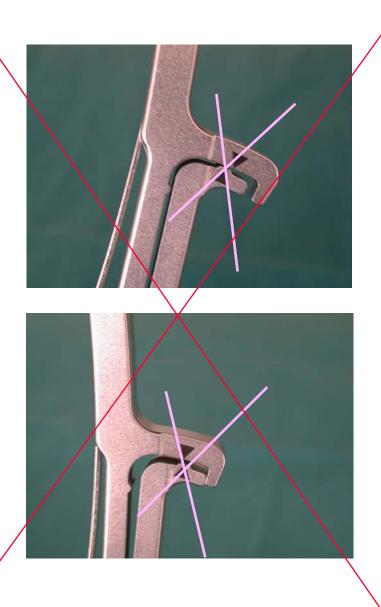

 На обоих рисунках некорректное совмещение отметок



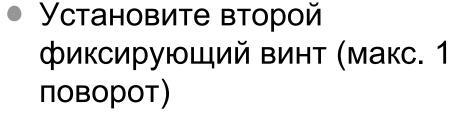


 Задайте преднагрузку на сегмент равную 300 Н (отметки на натяжителе шнура должны совпасть)

Промежуток отсутствует риксирующий винт

Важно:

Винт необходимо устанавливать только в один оборот перед затягиванием воизбежание повреждения шнура при натягивании!



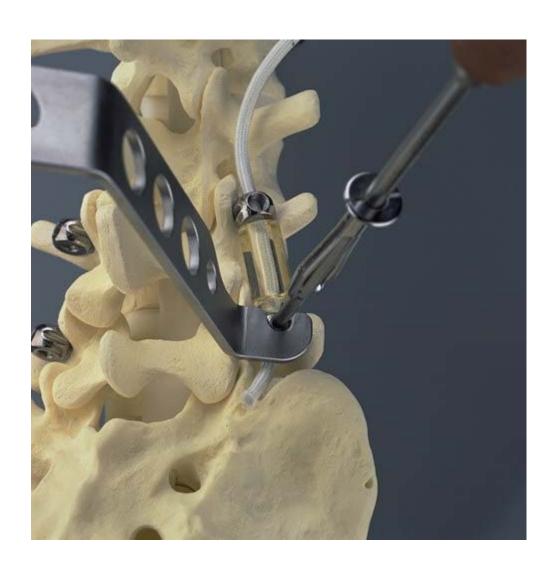

- Используйте инструмент блокировки винтов для того, чтобы избежать смещения педикулярного винта
- Закрепите с силой, равной 4 Нм
- Повторите процедуру фиксации на противоположной стороне



Мультисегментарная имплантация

- Повторите эту же процедуру для последующих сегментов
- Устанавливайте данную систему строго билатерально





 Отрежьте шнур, оставляя около 10 мм от головки винта

Внимание:

Не допускайте разволокнения шнура







Ушивание раны

- Сохраняйте анатомические уровни
- Подшейте поясничную фасцию к остистым отросткам трансоссально



После операции

- Анальгетики
- Профилактика тромбоэмболии
- Профилактика антибиотиками
- Ранняя физиотерапия

